




治療方針設定に基づいたシミュレーション*
を、Align™ Digital Workflow 内で
シームレスに作成

患者様固有の 3D 顔貌モデル
を、静的表示と治療終了時
の軟組織シミュレーション
の両方で確認でき、患者様
の治療への理解・納得を
サポートします。

透過表示、口腔内データや
Smile Architect/CBCT データ
との重ね合わせ表示を、
すべて一つの画面で様々な
角度から確認できます。

Invisalign® 3D Face Scan & 3D Tissue Animation

クリンチェック® 治療計画を、
次のステージへ

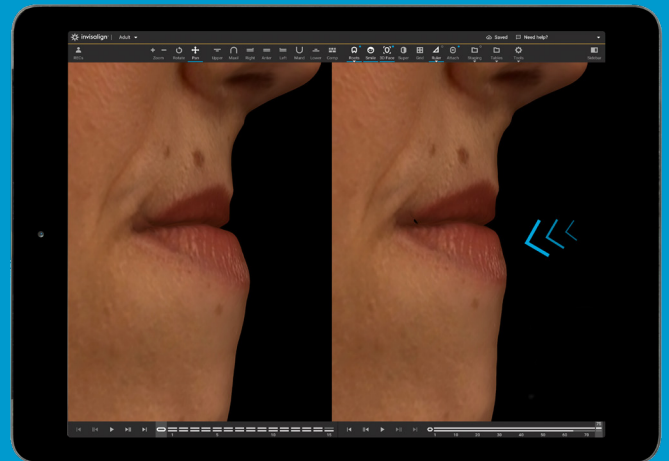

3D Tissue Animation**で、より深い理解と患者様とのコミュニケーションを

3D Tissue Animationでは、顔貌のバランス、左右対称性、顔面の垂直的なバランス、口唇の位置・閉口状態、バッカルコリドーを視覚的に確認いただけます。治療後の顔貌やスマイルのシミュレーションを3Dで視覚的に確認することで、患者様とのコミュニケーションがより円滑になり、治療内容への理解と納得感の向上をサポートします。

*画像、シミュレーション、および軟組織の変化は、臨床的な目的で提供されているものではありません。実際の結果は異なる場合があります。


**Invisalign Go™ シリーズでは、静止画の 3D Face Scan のみ利用可能です。



顔貌を起点とした可視化で理解を促進

3D Tissue Animation は、患者様ご自身の 3D 顔貌データをクリンチェック治療計画内に反映し、治療終了時の顔貌軟組織の変化をシミュレーションします。

使用方法

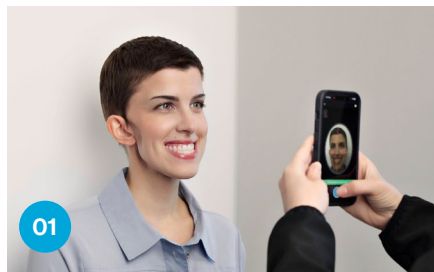


Invisalign® Practice アプリで撮影

対応デバイス（iPhone 10 以降、iPad、iOS 16 以降のみ）でご利用いただける「Invisalign® Practice アプリ」を画面上でのガイダンスに従って操作することで、ワイドスマイルや口を閉じた状態のスキンを素早く簡単に撮影できます。



クリンチェック® 治療計画上に反映

3D Face Scan データは自動的に患者記録に紐付けられます。クリンチェック治療計画の作成が完了すると、ツールバーで「3D Face」ビューを有効にするだけで、ソフトウェア上に 3D 顔貌データが表示されます。

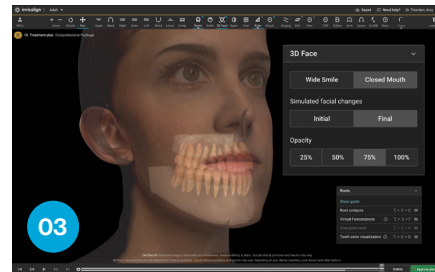

包括的に治療計画を可視化

レビューモードでは、回転や不透明度の調整、口腔内画像や CBCT データに基づく評価を、すべて一か所で行うことができます。「口を閉じた状態」を選択し、「初診時」と「完了時」を切り替えて、予測される軟組織の変化をご覧いただけます。

主要な利点

顔貌を起点とした治療シミュレーション

治療計画の初期段階から、顔全体のバランスやプロポーション、笑顔の審美性まで考慮した治療計画を立てることができます。

より円滑なコミュニケーション

患者様に、治療によって顔貌がどのように変化するかを説明するだけでなく、視覚的にお見せすることができます。患者様一人ひとりに合わせた3D可視化により、治療方針への理解を深め、より自信を持って治療を勧めることができます。

治療への納得度を高める

一般的なシミュレーションではなく、ご自身の顔で治療後のイメージを確認することで、治療のゴールをより具体的に理解できます。

シームレスな統合

新しいデバイスは必要ありません。「3D Tissue Animation」は、アライン™ デジタル・ワークフローおよびクリンチェック・ソフトウェアに組み込まれているため、これまでのワークフローをそのまま維持できます。

➤ 今すぐInvisalign® Practice アプリを更新し、スキャンを開始しましょう。

注記：

- 表示される画像・シミュレーション・軟組織の変化は、臨床上の診断や治療結果を保証するものではありません。実際の治療結果は患者様ごとに異なります。
- 撮影は Invisalign Practice アプリ（iPhone 10 以降、iPad、iOS 16 以降）のみ対応しています。
- 3D Tissue Animation は 3D コントロール／Plan Editor 使用中は表示されず、Review モードでご利用いただけます。
- 患者様向けの専用エクスポート機能には現時点で対応していません。
- Invisalign Go シリーズでは静止画の 3D Face Scan のみ対応しています。Tissue Animation には対応していません。

販売名：クリンチェック・ソフトウェア（医療機器承認番号：23000BZX00197000）

一般的名称：歯科矯正用治療支援プログラム

特定保守管理医療機器への該当性：非該当

製造販売業者：インビザライン・ジャパン合同会社

Download on the
App Store



align

© 2026 Align Technology, Inc. Align, Invisalign, ClinCheck, Align Digital Workflow, Invisalign Practice App and the starflower 230401 RevA

